



## Ihr persönliches Übungsset


Dieses Set soll Personen, die sich auf eine Stoma-Operation vorbereiten, im Anbringen eines Stomabeutelsystems schulen und dient dazu, das Tragen eines Stomabeutelsystems zu simulieren.

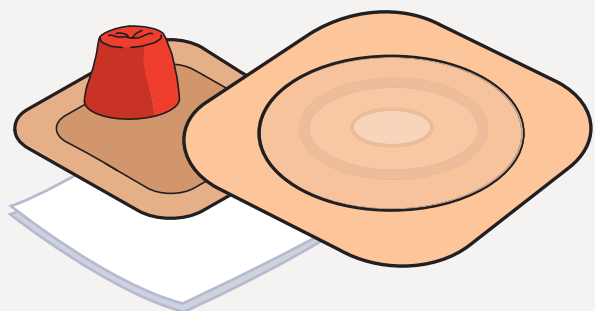


- 1** Entfernen Sie die Schutzfolie vom Hautschutzmaterial zu Trainingszwecken und bringen Sie anschließend das Pflaster auf Ihrem Bauch an, und zwar an der Stelle, die Ihnen Ihre Stomapflegeschulung oder Ihre medizinische Fachkraft angegeben hat.

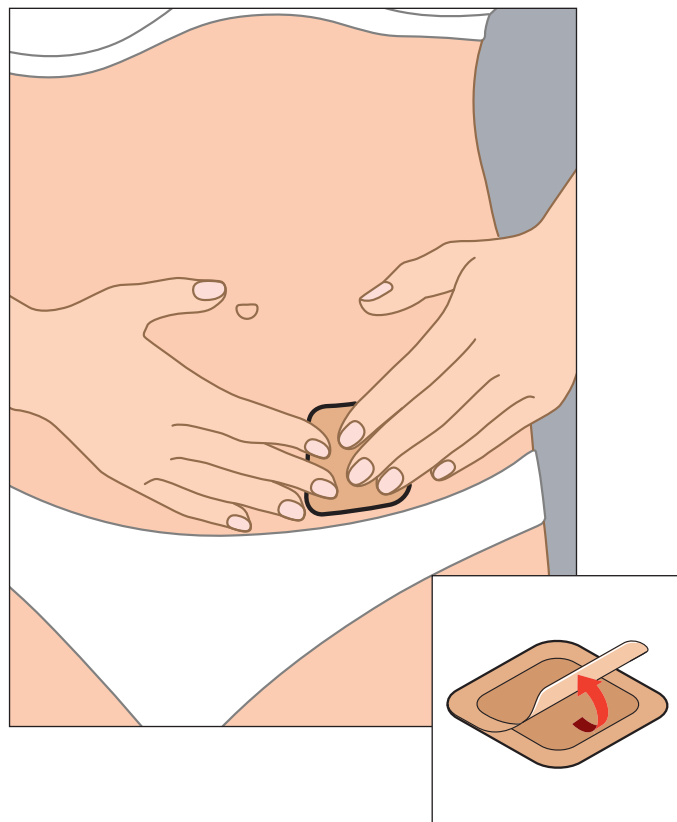

- 2** Entfernen Sie die Schutzfolie vom Stomamodell und bringen Sie dieses an dem Hautschutzmaterial zu Trainingszwecken an, das bereits auf Ihrer Haut angebracht ist.

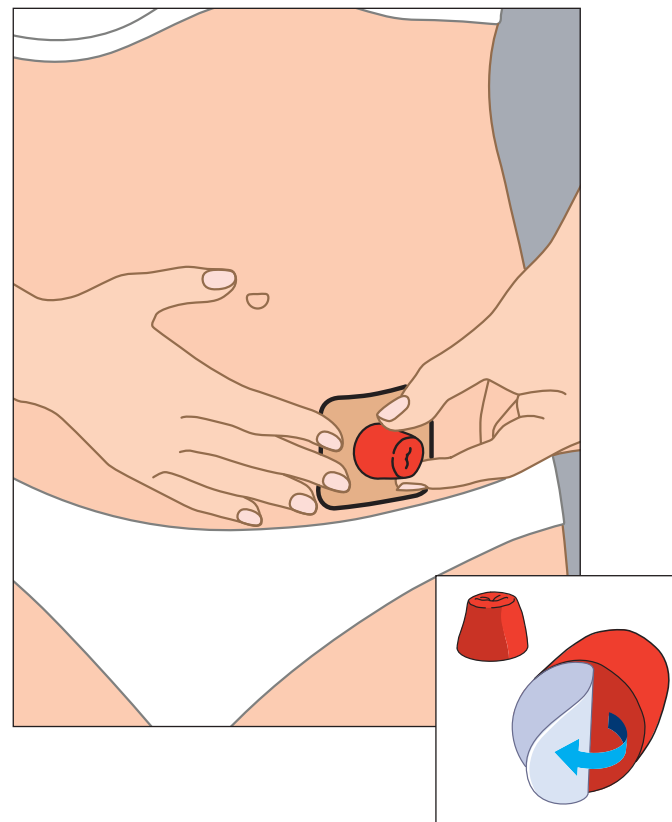


- 3** Entfernen Sie die Schutzfolie vom Hautschutz. Platzieren Sie das Loch mittig über dem Stomamodell und drücken Sie den Hautschutz sanft an das Hautschutzmaterial zu Trainingszwecken und an die Haut an. Falls erforderlich, fragen Sie Ihre Stomapflegeschulung oder medizinische Fachkraft um Rat.

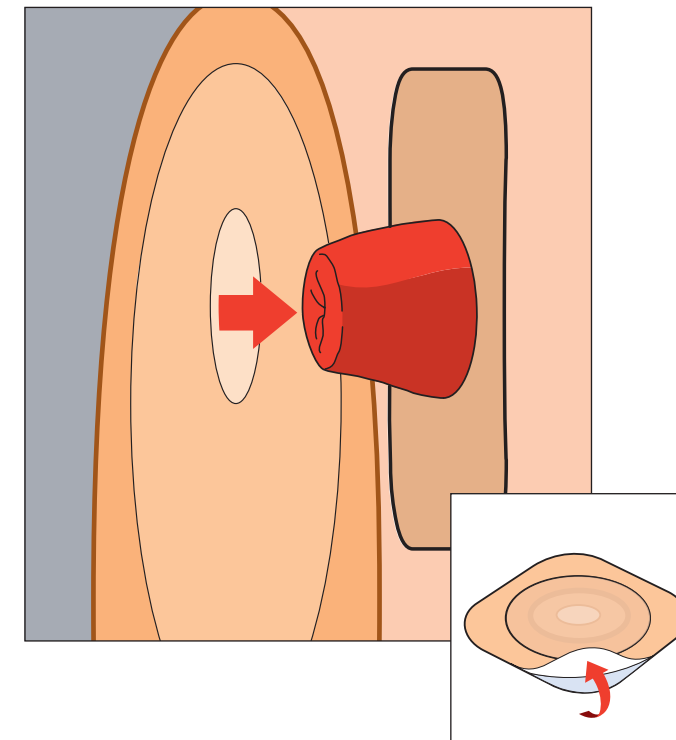

Hollister Österreich  
Hollister GmbH  
Bergmillergasse 5/1/1  
A-1140 Wien  
hollister.oesterreich@hollister.com  
www.hollister.at

Hollister Schweiz  
Liberty Medical Switzerland AG  
info@hollister.ch  
www.hollister.ch

Hollister, das Hollister Logo und „Gesunde Haut. Gute Aussichten.“ sind Markenzeichen von Hollister Incorporated.  
© 2022 Hollister Incorporated  
[www.hollister.com](http://www.hollister.com)

 Hollister Incorporated  
2000 Hollister Drive  
Libertyville, IL 60048 USA


**EC REP**  
Hollister ULC  
Foxford Road, Ballina  
Co. Mayo, Ireland

 **Hollister**

Stomaversorgung  
Gesunde Haut. Gute Aussichten.


4

Bei Verwendung eines zweiteiligen Versorgungssystems bringen Sie den Beutel an der Basisplatte an.

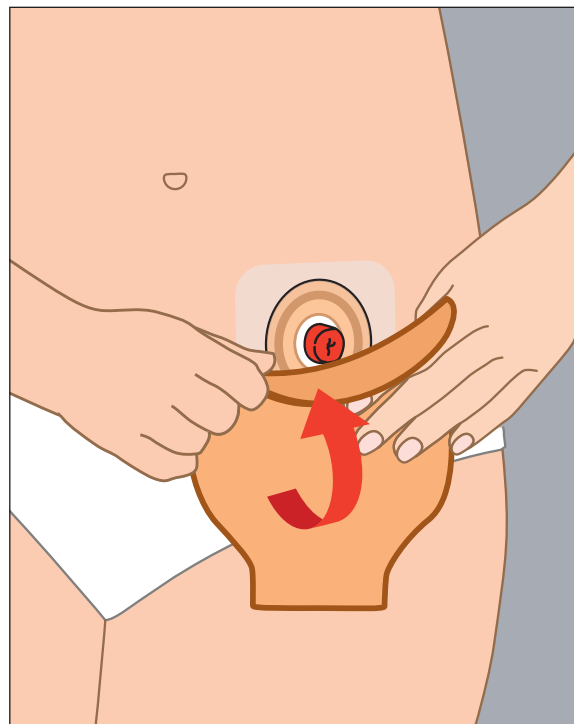


5

Um das Hautschutzmaterial zu Trainingszwecken und den Stomabeutel zu entfernen und zu entsorgen, ziehen Sie die Basisplatte des Beutels vorsichtig von der Haut ab und beginnen Sie dabei an der Oberseite. Ziehen Sie die Basisplatte vorsichtig nach unten ab, bis sie vollständig entfernt ist. Das Hautschutzmaterial zu Trainingszwecken und das Stomamodell werden dabei wahrscheinlich ebenfalls entfernt.

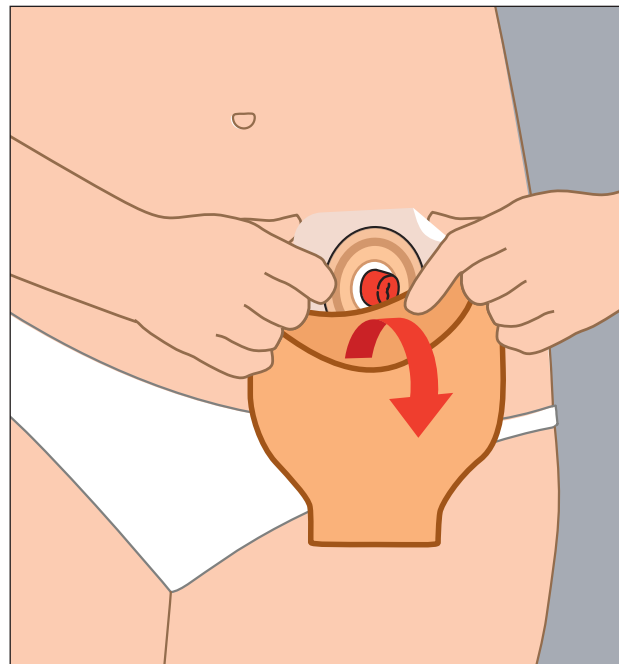

**Optional:** Pflaster-Entfernertuch (im Lieferumfang enthalten) kann beim Ablösen der Stoma-Hautschutzplatte und des Hautschutzmaterials zu Trainingszwecken von der Haut verwendet werden. Beachten Sie die mit den Pflaster-Entfernertüchern mitgelieferte Gebrauchsanleitung.

Bitte beachten Sie die örtlichen Entsorgungsvorschriften.

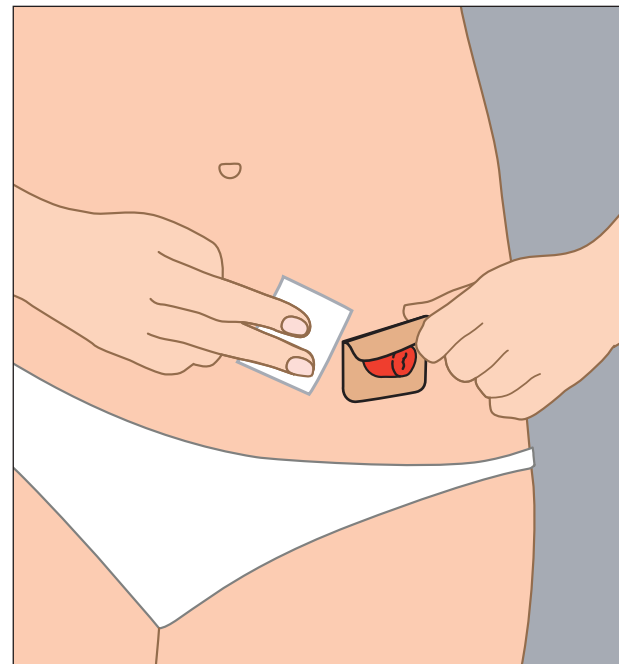

#### Inhalt des Stomabeutel-Übungssets

- 2x Hautschutzmaterial zu Trainingszwecken
- 2 Stomamodelle
- Stomabeutelsystem (kann im Set enthalten sein oder von Ihrer Stomapflegefachkraft bereitgestellt werden)
- 2 Pflaster-Entfernertücher

#### Produktbeschreibung

Das Hautschutzmaterial zu Trainingszwecken, das Stomamodell und das Stomabeutelsystem (siehe Inhalt) müssen nach der Trainingsphase entfernt und entsorgt werden. Hautschutzmaterial zu Trainingszwecken und Stoma-Hautschutzplatte bestehen aus hydrokolloidem Haftmaterial, Polymer-/Copolymer-Kunststoffen und Vliesstoff. Das Stomamodell besteht aus PU (Polyurethan). Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt.

#### Indikationen und bestimmungsgemäßer Verwendungszweck

Dieses Set soll Personen, die sich auf eine Stoma-Operation vorbereiten, im Anbringen eines Stomabeutelsystems schulen und dient dazu, das Tragen eines Stomabeutelsystems zu simulieren.

#### Warnhinweise

Die Wiederverwendung eines Einmalprodukts kann zu Risiken (wie etwa schlechter Haftung) für den Anwender führen.


#### Vorsichtsmaßnahmen

Nur wie angegeben verwenden. Nicht weiter verwenden, wenn Hautreizungen auftreten. Bei Anbringung des Stomamodells direkt auf der Haut können Hautschäden (z. B. Irritationen, rissige Haut, Ausschläge oder Rötungen) auftreten.

#### Anmerkungen

Um eine optimale Haftung zu gewährleisten, wenden Sie das Hautschutzmaterial zu Trainingszwecken auf sauberer, trockener und intakter Haut an. Verzichten Sie auf Öle oder Lotionen. Diese Produkte können die Haftung Ihrer Versorgung beeinträchtigen. Sollten Sie Hilfe mit dem Stomabeutelsystem benötigen oder sollten Hautreizungen auftreten, kontaktieren Sie Ihre zuständige Stomapflegefachkraft oder eine medizinische Fachkraft.

Setzen Sie sich im Falle einer schwerwiegenden Verletzung (Vorkommnis) in Verbindung mit der Verwendung des Produkts bitte mit Ihrem lokalen Händler oder dem Hersteller sowie Ihrer zuständigen Behörde vor Ort in Verbindung ([www.hollister.com/authority](http://www.hollister.com/authority)).

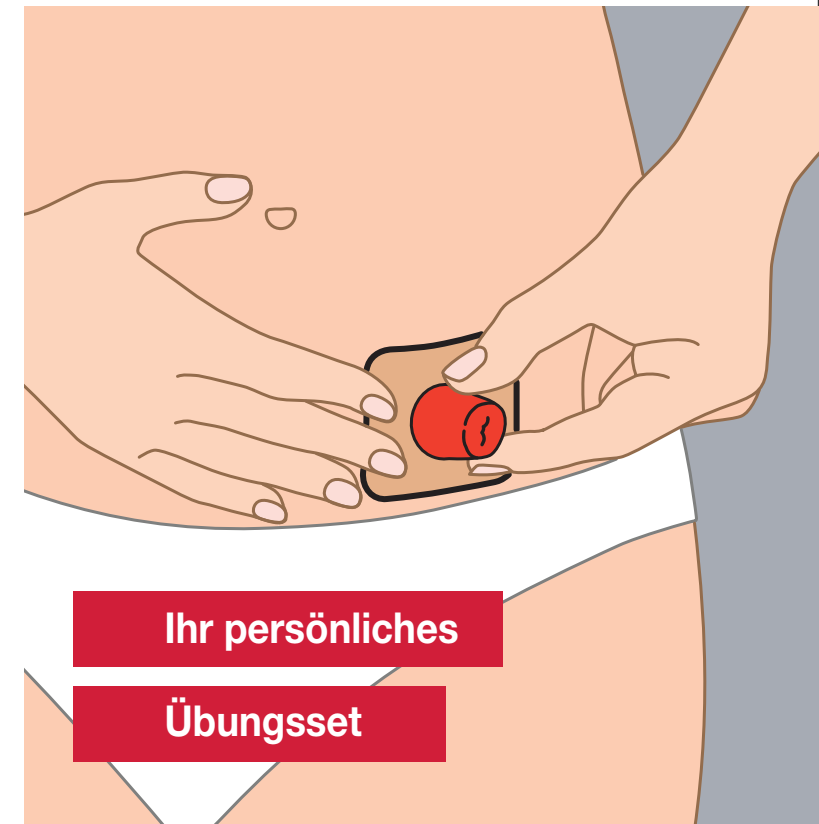

 **Hollister**

**Stomaversorgung**  
Gesunde Haut. Gute Aussichten.