

Mode d'emploi de la sonde VaPro Plus Pocket™




1. Rassembler le matériel et préparer la zone.
2. Se laver les mains selon les recommandations de votre professionnel de la santé.




3. Se placer de façon à pouvoir procéder au sondage intermittent. Écarter ou retirer les vêtements pour avoir accès aux organes génitaux.

- 4a. Pour ouvrir, tirer sur le trou vers soi jusqu'en bas de l'emballage.

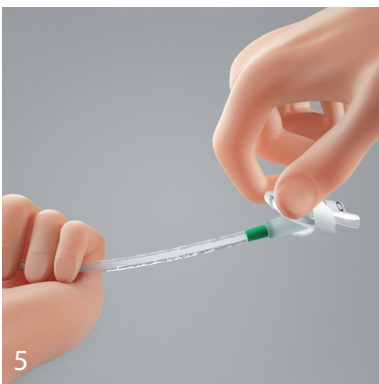

- 4b. Retirer la sonde de l'emballage.

5. La poche de recueil étant orientée vers le haut, tenir la sonde dans une main tout en écartant la poche de la sonde avec l'autre main pour rompre la bande de papier. Déplier la poche de recueil. Laisser la sonde sur les genoux, le lavabo ou une autre surface plane.

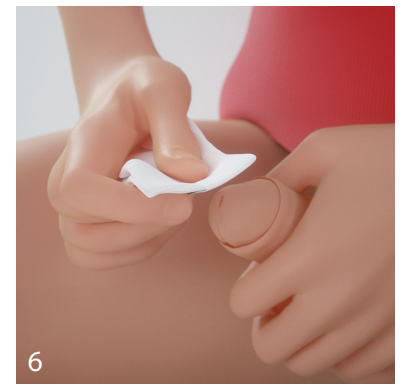

6. Tenir le pénis de la main gauche (si droitier) ou de la main droite (si gaucher) jusqu'à la fin de la procédure. Décalotter (le cas échéant), et nettoyer le gland selon les recommandations et conseils fournis par votre professionnel de la santé.



7. Retirer le capuchon de l'embout introducteur.

8. Tenir la sonde d'une main et, avec l'autre, la faire avancer à l'intérieur de son emballage individuel jusqu'à ce que le bout de la sonde arrive dans l'embout introducteur sans en sortir.




9. Prendre la sonde sous la base de l'embout introducteur.

VaPro Plus Pocket™
Sonde hydrophile No Touch



10. Serrer doucement le pénis avec la main gauche (si droitier) ou droite (si gaucher) pour ouvrir le méat urétral. Insérer l'embout de l'introducteur de la main gauche (si gaucher) ou de la main droite (si droitier) jusqu'à ce que la base touche le méat urétral.

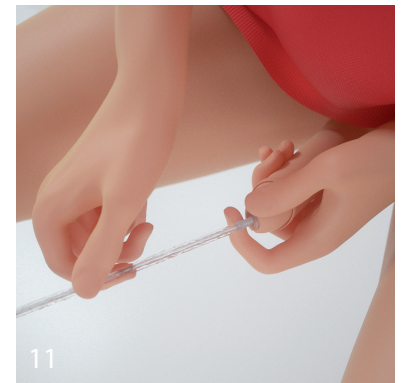

11. Faire avancer la sonde dans l'urètre jusqu'à ce que l'urine commence à s'écouler.

12. Une fois que l'urine a cessé de couler, tirer lentement sur la sonde. Si l'urine continue de couler, attendre jusqu'à ce qu'elle cesse de couler. Lorsque la vessie est totalement vide, retirer complètement la sonde. Recalotter le prépuce (le cas échéant).



13. . Une fois le sondage terminé, tenir la poche de recueil par la poignée.

14. Pour vider la poche de recueil avant l'élimination, déchirer au niveau de la flèche (Tear here to empty) pour vider l'urine.

15. . Mettre la sonde, la poche de recueil et l'emballage à la poubelle. Ne pas la jeter dans les toilettes.



16. Se laver les mains.

AVERTISSEMENT : Afin de réduire le risque d'infection et/ou de complication, ne pas réutiliser.

AVERTISSEMENT : En cas d'effet indésirable ou de signe de traumatisme, arrêter l'utilisation du produit et consulter immédiatement un médecin.

• Set pour sondage intermittent prêt à l'emploi en système fermé à usage unique • Sonde sans phtalates avec revêtement hydrophile • Sa gaine protectrice et son embout introducteur permettent de pratiquer la technique no-touch • 2 oeillets atraumatiques • La couleur du connecteur indique la taille de la sonde • Capuchon protecteur facile à ôter • Poche de recueil de 1000 mL • Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel

INDICATIONS

Cette sonde pour sondage intermittent est un tube flexible qui est inséré dans l'urètre par les patients hommes, femmes et enfants ayant besoin de vider l'urine présente dans leur vessie.

PRÉCAUTION : Consulter un médecin avant d'utiliser ce matériel si les symptômes suivants apparaissent :

• Lésion de l'urètre • Saignement inexplicable de l'urètre • Sténose prononcée de l'urètre • « Fausse Route » • Inflammation de l'urètre (urétrite) • Inflammation de la prostate (prostatite) • Inflammation de l'épididyme (épididymite)

PRÉCAUTION : Le sondage doit être effectué selon les recommandations de soin et les conseils d'un médecin et uniquement conformément au mode d'emploi fourni. La fréquence de sondage (insertion d'une sonde urinaire) varie selon les personnes. Elle doit donc vous être indiquée par votre professionnel de la santé. Pour toute autre question relative à votre sondage, veuillez contacter votre professionnel de la santé.

NOTE : Les boîtes doivent être rangées à plat et à température ambiante.

Ce produit comprend : une gaine en polyuréthane, un guide en élastomère thermoplastique, et une tubulure sans DEHP.

Hollister
Bernstrasse 388
8953 Dietikon
0800 55 38 39
info@hollister.ch
www.hollister.ch