


Votre kit de formation


Le kit a pour but de former à l'application d'un système de poche de stomie et de simuler le port d'un système de poche de stomie pour les personnes qui se préparent à une chirurgie de stomie.

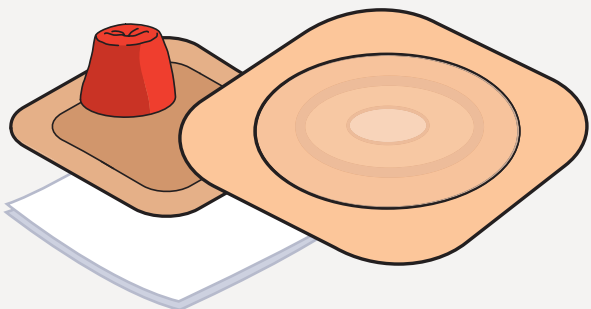


- 1** Retirez le film protecteur du support pour simulation, puis appliquez le support sur votre abdomen à la position indiquée par votre infirmier(ère) stomathérapeute ou votre professionnel de santé.



- 2** Retirez le film protecteur du modèle de stomie et appliquez-le sur le support pour simulation déjà appliqué sur votre peau.

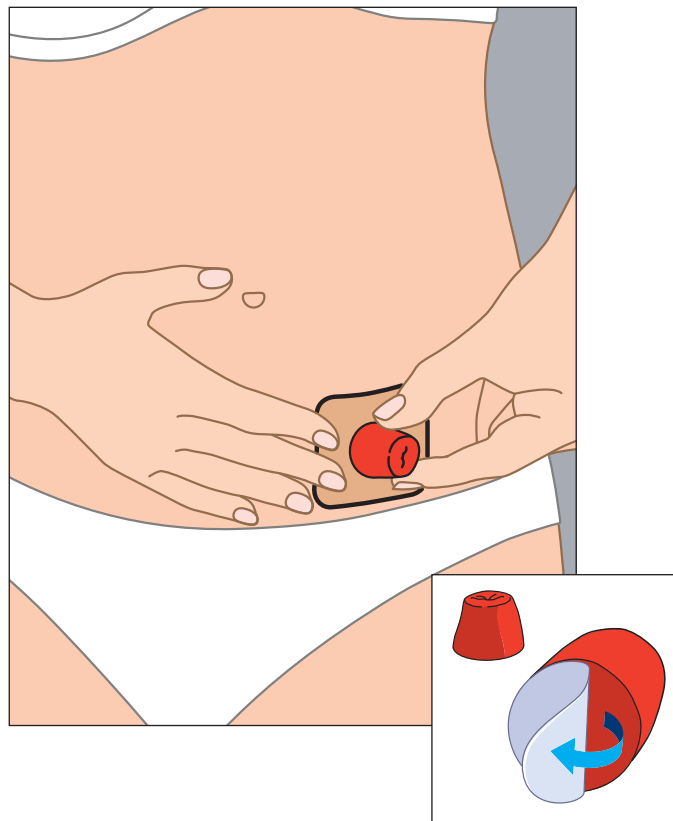


- 3** Retirez le film protecteur du protecteur cutané. Centrez le trou sur le modèle de stomie et appuyez délicatement sur le protecteur cutané jusqu'à ce qu'il soit en contact avec le support pour simulation et la peau. Si nécessaire, demandez conseil à votre infirmier(ère) stomathérapeute ou à votre professionnel de santé.

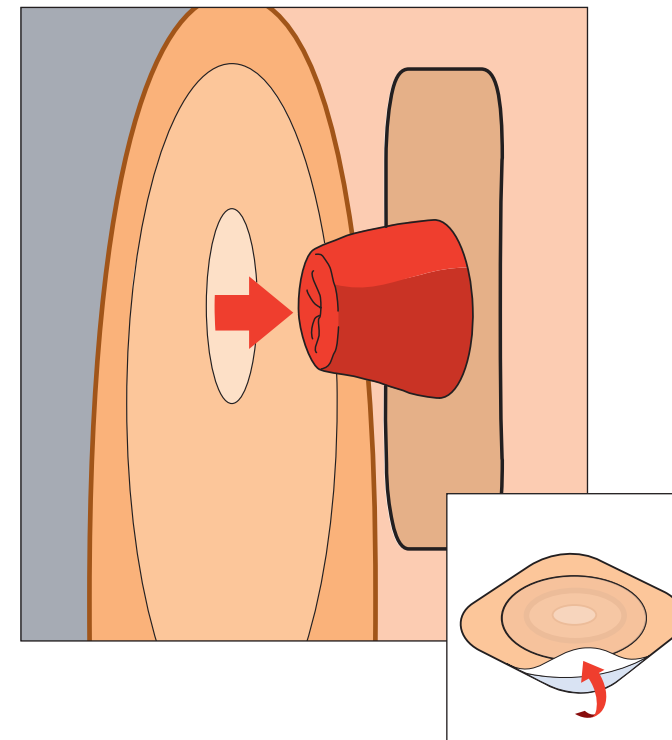

Hollister Suisse
Liberty Medical Switzerland SA
info@hollister.ch
www.hollister.ch

Hollister
Hollister France Inc. Belgian Branch
Avenue Einstein 8
1300 Wavre
0800 90 626
hollistercontact@hollister.com
www.hollister.be

Hollister, le logo Hollister et « Tout commence par une peau saine. » sont des marques déposées de Hollister Incorporated.
© 2022 Hollister Incorporated
www.hollister.com


Hollister Incorporated
2000 Hollister Drive
Libertyville, IL 60048 USA


EC REP
Hollister ULC
Foxford Road, Ballina
Co. Mayo, Ireland

 **Hollister**


Stomathérapie
Tout commence par une peau saine.

4

En cas d'utilisation d'un système de poche de stomie composé de 2 pièces, fixez la poche au protecteur cutané.

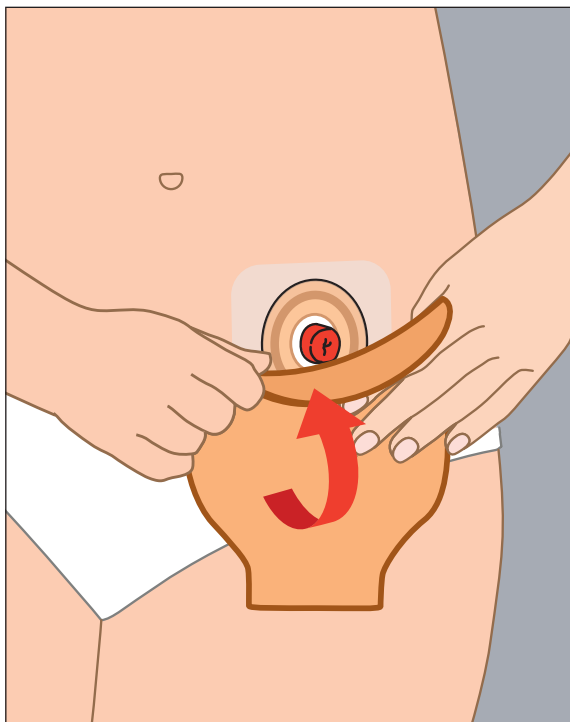
**5**

Pour retirer et mettre au rebut le support pour simulation et la poche de stomie, décollez délicatement le protecteur cutané de la poche pour le détacher de la peau, en commençant par la partie supérieure. Décollez délicatement le protecteur cutané en tirant vers le bas jusqu'à son retrait complet. Le support pour stimulation et le modèle de stomie risquent de se décoller également.

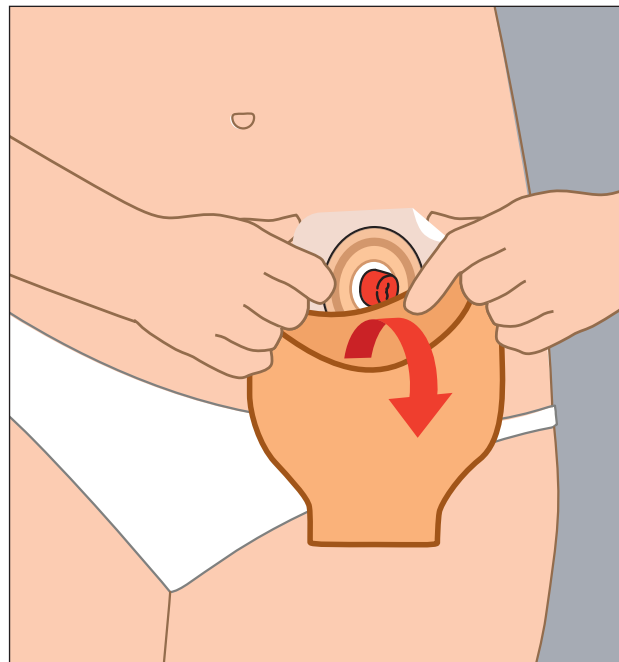

En option : vous pouvez utiliser une lingette pour retrait d'adhésif (incluse) pour décoller le protecteur cutané et le support pour simulation de la peau. Veuillez consulter le mode d'emploi fourni avec les lingettes pour retrait d'adhésif.

Veuillez respecter toutes les réglementations locales relatives à la mise au rebut.

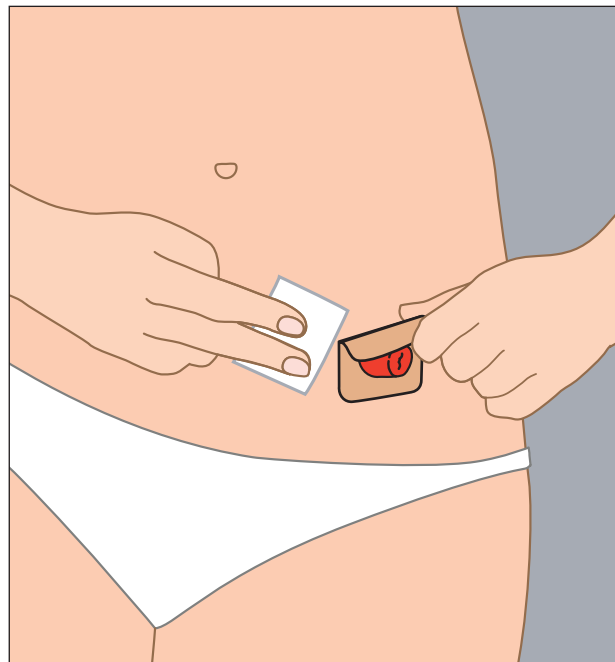

Contenu du kit de formation pour poche de stomie

- 2 supports pour simulation
- 2 modèles de stomie
- Un système de poche de stomie (peut être fourni dans le kit ou par votre infirmier(ère) stomathérapeute)
- 2 lingettes pour retrait d'adhésif

Description du produit

Le support pour simulation, le modèle de stomie et le système de poche de stomie (voir la section Contenu) sont conçus pour être retirés et mis au rebut à l'issue de la période de formation. Le support pour simulation et le protecteur cutané du système de poche de stomie sont fabriqués à partir d'adhésif cutané hydrocolloïde, de matières plastiques polymères/copolymères et d'un voile non-tissé. Le modèle de stomie est fabriqué à partir de polyuréthane (PU). Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel.

Indications et utilisation prévue

Le kit a pour but de former à l'application d'un système de poche de stomie et de simuler le port d'un système de poche de stomie pour les personnes qui se préparent à une chirurgie de stomie.

Avertissements

La réutilisation d'un produit à usage unique peut entraîner un risque potentiel pour l'utilisateur, notamment une mauvaise adhérence.


Précautions

Utiliser conformément aux instructions du mode d'emploi uniquement. Cesser l'utilisation en cas d'irritation. Si le modèle de stomie est directement appliqué sur la peau, des lésions cutanées peuvent survenir (p. ex., irritation, éraflure, éruption cutanée ou rougeur).

Remarques :

Pour garantir une bonne adhérence du support pour simulation, appliquez sur une peau intacte propre et sèche. N'utilisez pas d'huiles ou de lotions. Ces produits peuvent interférer avec l'adhérence du protecteur cutané. Contactez un(e) infirmier(ère) stomathérapeute ou un professionnel de santé pour obtenir des conseils sur le système de poche de stomie ou les irritations cutanées.

En cas de blessure grave (incident) liée à votre utilisation du produit, contactez votre distributeur ou fabricant local, ainsi que votre autorité compétente locale (www.hollister.com/authority).

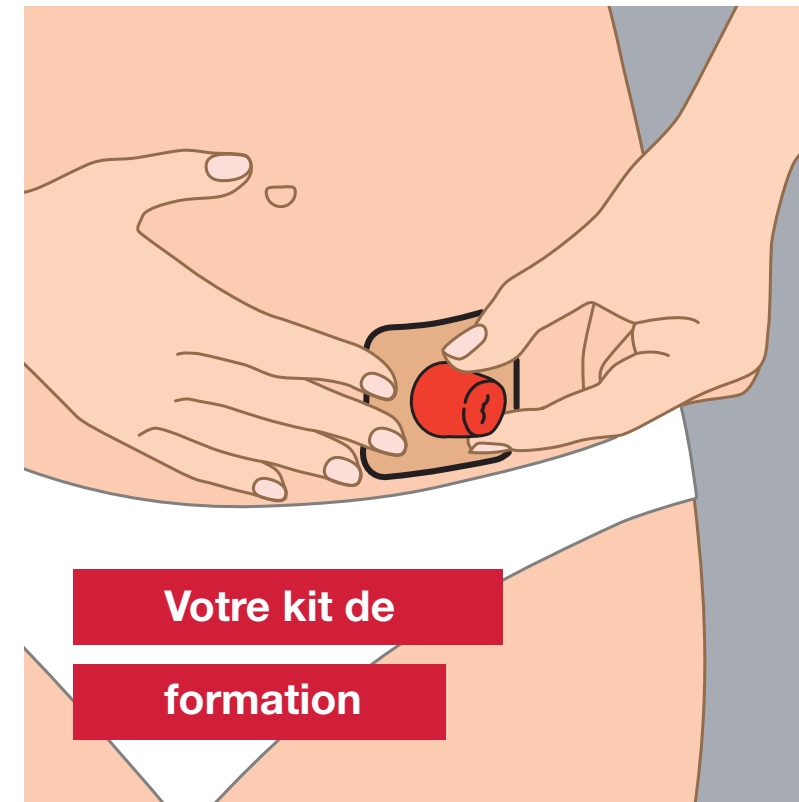

Votre kit de

formation



Hollister

Stomathérapie

Tout commence par une peau saine.