


Il tuo personal trainer

Il kit è destinato a coloro che si trovano a prepararsi per un intervento chirurgico di stomia al fine di imparare ad applicare un sistema di raccolta per stomia e simularne il suo utilizzo.

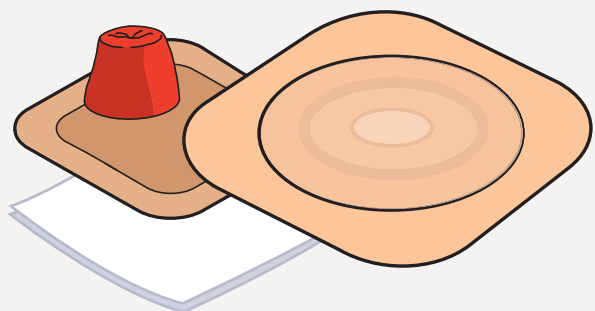


1

Rimuovere la pellicola protettiva dalla barriera adesiva per la formazione, quindi applicarla sull'addome nella posizione indicata dal personale infermieristico dedicato o da un operatore sanitario.




2

Rimuovere la pellicola protettiva dal modello di stomia e posizionarlo sulla barriera adesiva per la formazione già applicata sulla cute.

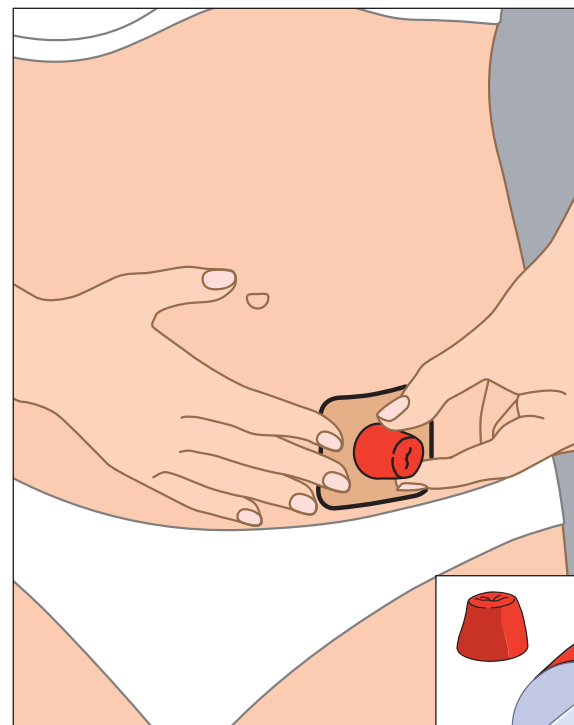

3

Rimuovere la pellicola protettiva dalla barriera cutanea. Centrare il foro sul modello di stomia e premere delicatamente la barriera cutanea sulla barriera adesiva per la formazione e sulla cute. Se necessario, consultare il personale infermieristico dedicato o un operatore sanitario.

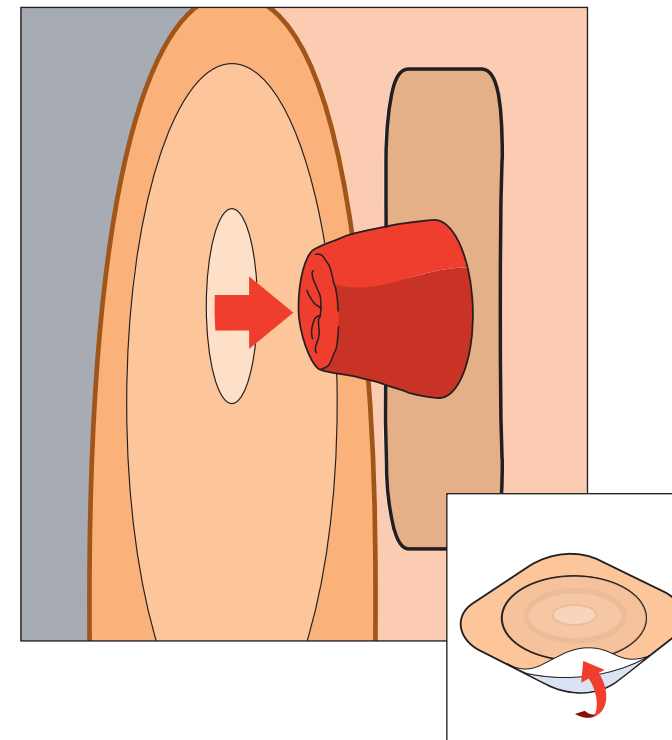

Hollister Svizzera
Liberty Medical Switzerland AG
info@hollister.ch
www.hollister.ch

Hollister, il logo Hollister e "Healthy skin. Positive outcomes." sono marchi di Hollister Incorporated.
© 2022 Hollister Incorporated
www.hollister.com



Hollister Incorporated
2000 Hollister Drive
Libertyville, IL 60048 USA

EC REP


Hollister ULC
Foxford Road, Ballina
Co. Mayo, Ireland

 **Hollister**

Ostomy Care
Healthy skin. Positive outcomes.


4

Se si utilizza un sistema di raccolta due pezzi, agganciare la sacca alla barriera cutanea.

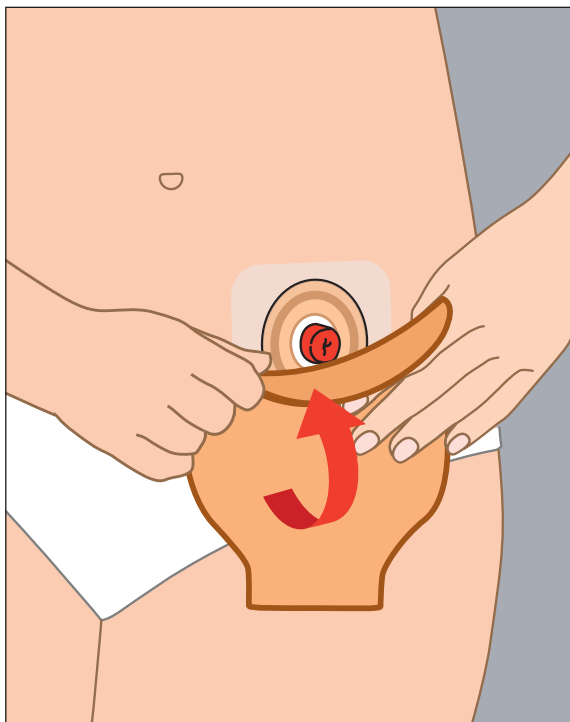


5

Per rimuovere e smaltire la barriera adesiva per la formazione e la sacca per stomia, staccare delicatamente la barriera cutanea con la sacca dalla cute, iniziando dalla parte superiore. Staccare con cura la barriera cutanea verso il basso fino alla rimozione completa. È probabile che anche la barriera adesiva per la formazione ed il modello di stoma vengano rimossi.

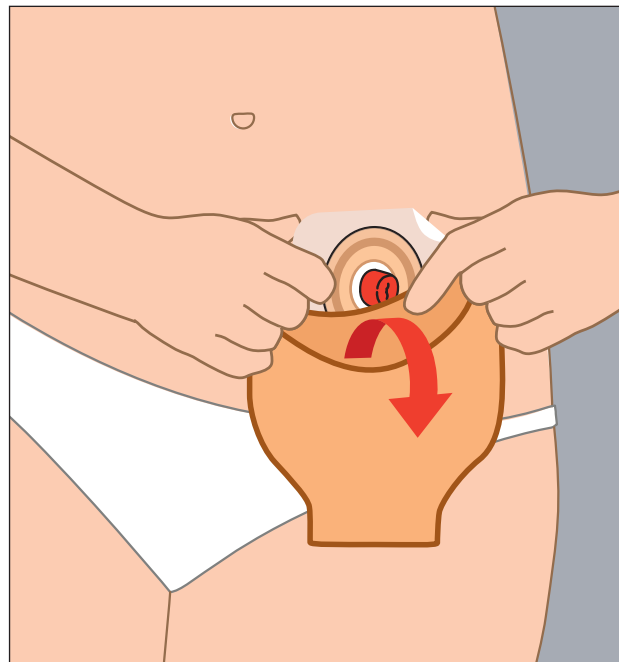

Facoltativo: la salvietta per la rimozione di adesivi (inclusa) può essere utilizzata quando si staccano la barriera cutanea e la barriera adesiva per la formazione dalla cute. Vedere le istruzioni per l'uso fornite con le salviette per la rimozione di adesivi.

Attenersi a tutte le normative locali in tema di smaltimento.

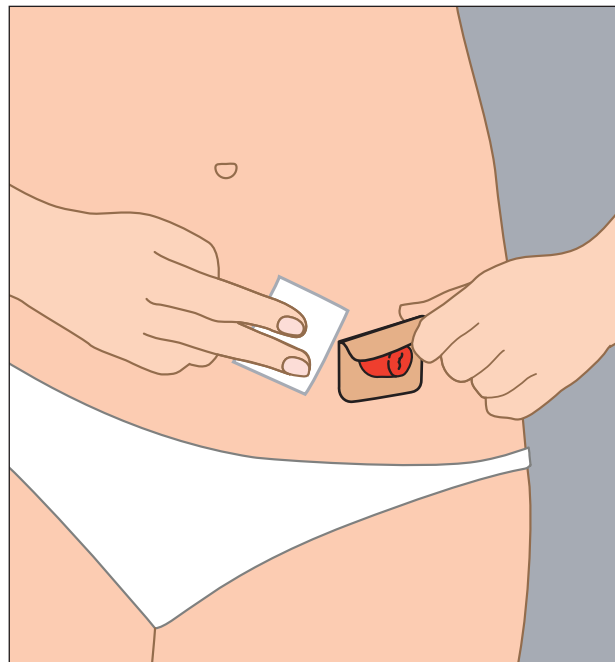

Contenuto del kit per prove pratiche con le sacche per stomia

- 2 barriere adesive per la formazione
- 2 modelli di stoma
- Sistema di raccolta per stomia (può essere fornito nel kit o dal personale infermieristico dedicato)
- 2 salviette per la rimozione di adesivi

Descrizione del prodotto

La barriera adesiva per la formazione, il modello di stoma e il sistema di raccolta per stomia (vedere la sezione Contenuto) sono progettati per essere rimossi e smaltiti dopo la prova pratica. La barriera adesiva per la formazione e la barriera cutanea con sacca per stomia sono realizzate con adesivo cutaneo idrocolloidale, materiali plastici di copolimero/polimero e tessuto non tessuto. Il modello di stoma è realizzato in poliuretano (PU). Realizzato senza lattice di gomma naturale.

Indicazioni e utilizzo previsto

Il kit è destinato a coloro che si trovano a prepararsi per un intervento chirurgico di stomia al fine di imparare ad applicare un sistema di raccolta per stomia e simularne il suo utilizzo.

Avvertenze

Il riutilizzo di un prodotto monouso può essere fonte di potenziali rischi per l'utilizzatore, come una minore aderenza.


Precauzioni

Utilizzare esclusivamente come indicato. In caso di irritazione interrompere l'utilizzo. Se il modello di stoma viene applicato direttamente alla cute, c'è il rischio che la cute si danneggi (ad es. irritazioni, lesioni, eruzioni o arrossamenti).

Note

Al fine di garantire un'adesione adeguata della barriera adesiva per la formazione, applicarla su cute pulita, asciutta e integra. Non utilizzare oli o lozioni. Tali prodotti potrebbero interferire con l'adesione della barriera cutanea. Contattare il personale infermieristico dedicato o un operatore sanitario in grado di fornire un aiuto con il sistema di raccolta per stomia o in caso di irritazione cutanea.

In caso di gravi lesioni (incidente) correlate all'uso del prodotto, contattare il proprio distributore locale o il produttore, nonché l'autorità competente locale (www.hollister.com/authority).

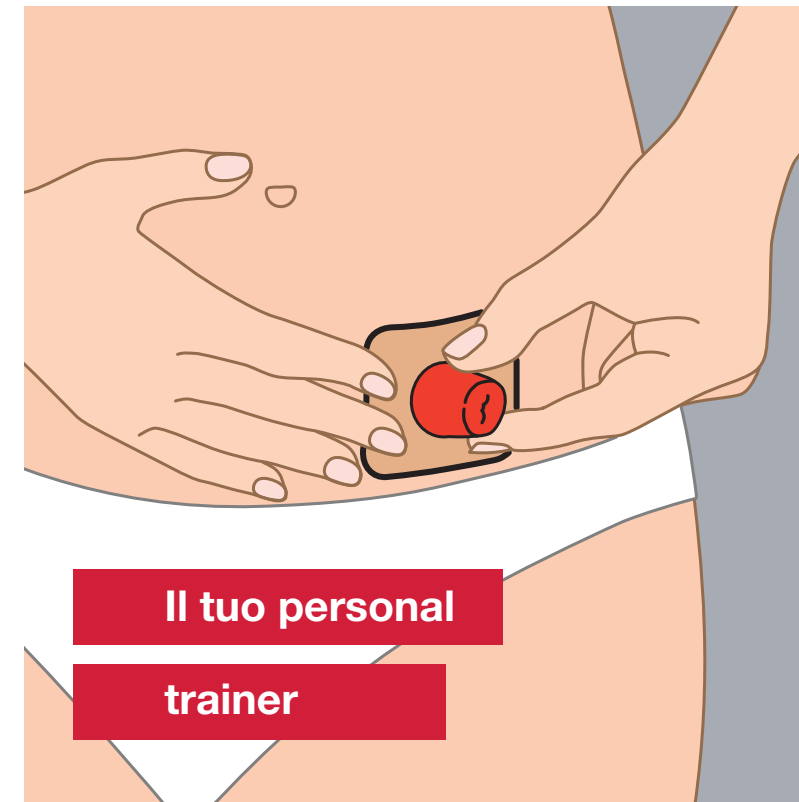

Ostomy Care
Healthy skin. Positive outcomes.